


PRAWIDŁOWY POMIAR I OKREŚLENIE ROZMIARU


PRODUKTY KOMPRESYJNE NA ŻYLAKI I OBRZĘKI NÓG

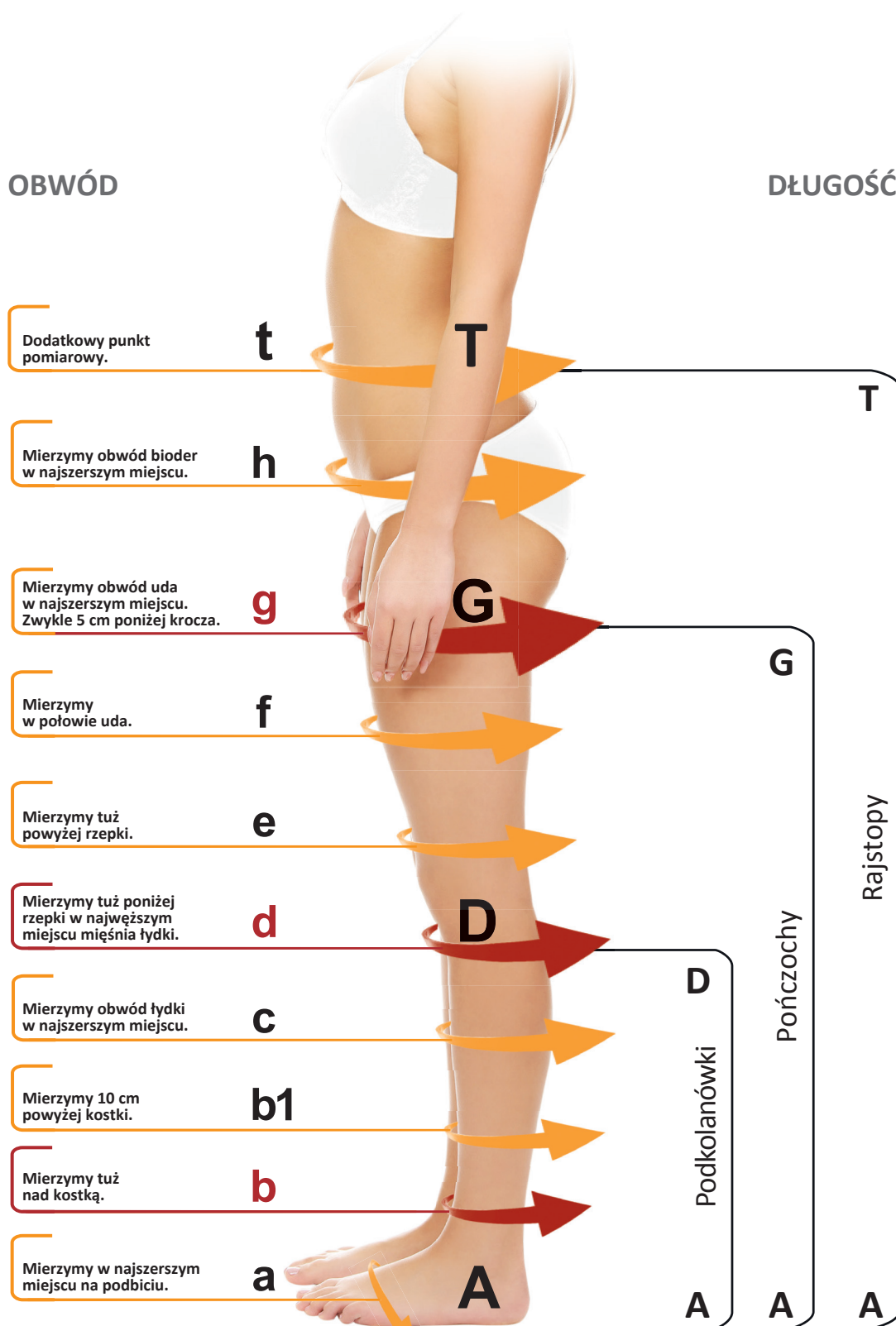

Rozmiar ma znaczenie!

Pończochy Avicenum to pończoszniczy wyrób medyczny. Prawidłowy pomiar kończyny i określanie wielkości pończochy jest niezbędne do skutecznego leczenia uciskowego. Rozmiar pończoch musi zostać wybrany według szczegółowej tabeli rozmiarów i wielkości producenta. Wysokiej jakości produkty mają wiele rozmiarów, aby pasowały do każdego typu sylwetki. Certyfikowani producenci oferują również produkcję na miarę. Więcej na: www.avicenum.pl

Punkty pomiarów – noga

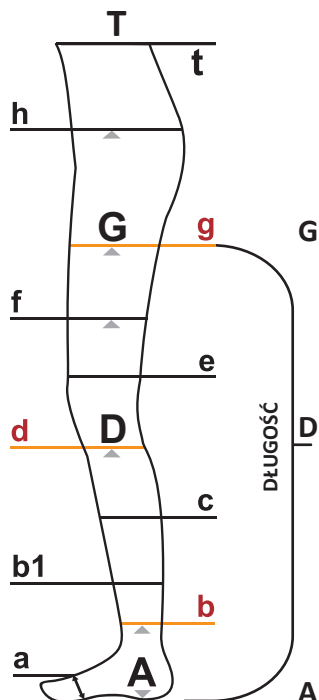

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10 cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (pośrodku uda)
- g obwód uda (5 cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

TABELA ROZMIARÓW I KLASY KOMPRESJI

OBWÓD W PUNKTACH							
ROZMIAR		b	d	f	g	h	t
NOWY	STARY						
S	1	20 – 24	34 – 37	46 – 50	50 – 55	110	80
M	2	24 – 27	37 – 40	50 – 54	55 – 60	120	90
L	3	27 – 30	40 – 44	54 – 58	60 – 66	130	100

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	
NOWY	NORMAL	LONG
STARY	K/krótka	D/długa
Podkolanówki A-D	do 37	od 37
Pończochy Rajstopy A-G	do 70	od 70

A-D, A-G długość

TABELA ROZMIARÓW II, I, III, KLASY KOMPRESJI

OBWÓD W PUNKTACH											
ROZMIAR		a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
NOWY	STARY										
S-	1-	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S	1	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+	1+	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-	2-	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M	2	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+	2+	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-	3-	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L	3	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+	3+	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-	4-	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL	4	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+	4+	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL	5	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ		
NOWY	SHORT	NORMAL	LONG
STARY	UK/ultra krótka	K/krótka	D/długa
Podkolanówki A-D	-	34-38	38-43
Pończochy Rajstopy A-G	56 - 62	62-71	71-82

A-D, A-G długość

TABELA ROZMIARÓW POŃCZOCH PRZECIWZAKRZEPOWYCH



ROZMIAR	OBWÓD W PUNKTACH		
	b	d	g
S	17 – 20	28 – 34	41 – 54
M	20 – 23	31 – 37	48 – 61
L	23 – 26	34 – 40	55 – 68
XL	26 – 29	37 – 43	62 – 75
XXL	29 – 32	40 – 46	69 – 82


ARIES rady dla Ciebie:

Jeżeli Twoje nogi posiadają niestandardową wielkość i z tego powodu nie możesz wybrać dla siebie produktu z oferty rozmiarów znajdujących się w tabeli, oferujemy wykonanie pończoch uciskowych Avicenum II i III klasy kompresji przygotowanych wg indywidualnych wymiarów pacjenta. Więcej na: www.aries.eu/pl/medico/dla-fachowcow/na-wymiar.html

Avicenum ARM SLEEVE 360

Punkty pomiarów – ręką

TABELA ROZMIARÓW (rękaw uciskowy)

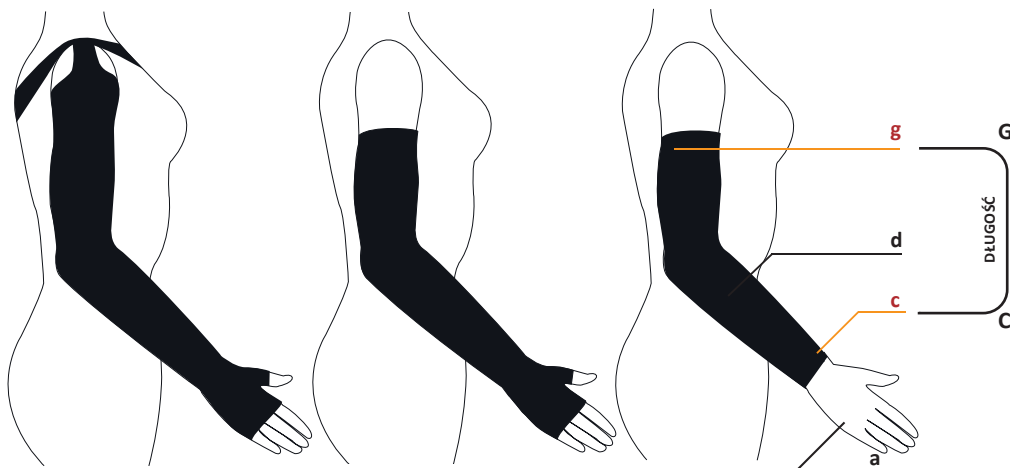

- a obwód dłoni
- c obwód nadgarstka
- d obwód przedłokciowy
- g obwód pod pachą
- C-G długość

ARIES rady dla Ciebie:

Przy określaniu wielkości prosimy **zwrócić uwagę na pomiar**. Od pomiaru zależy prawidłowa funkcja pończochy/ rękawa medycznego. Pomiaru należy dokonać **rano**. W ciągu dnia kończyny puchną. Należy zmierzyć wszystkie punkty wymienione w tabeli rozmiarów danego produktu. Umieszczenie punktów pomiarowych na kończynie jest pokazane na rysunkach. Przy wyborze rozmiaru produktu, najważniejsze są **wartości oznaczone w tabeli kolorem pomarańczowym**.

ROZMIAR		OBWÓD W PUNKTACH			
NOWY	STARY	a	c	d	g
S	1	do 18	16 – 19	22 – 26	24 – 30
M	2	do 20	19 – 22	26 – 30	30 – 36
L	3	do 23	22 – 25	30 – 34	36 – 42
XL	4	do 25	25 – 28	34 – 38	42 – 48

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	
NOWY	NORMAL	LONG
STARY	K/krótka	D/długa
C – G	do 45	od 45